

組立てトランク型自動ラップ式トイレ

# ラップポン・トレッカー WT-4GV

## ラップポン・トレッカー WT-4GV

品番	WT4SE002G	価格	160,000円(税抜)
質量	本体約12kg ACアダプター約600g		
寸法	使用時:幅390mm、奥行き460mm、高さ400mm		
	収納時:幅390mm、奥行き460mm、高さ270mm		
材質	本体・脚…アルミニウム合金 便座…PP		
電源	AC100V、50・60Hz(ACアダプター) 又は DC14.8V(専用バッテリー) 又は DC12V(車用DCケーブル) ※電源選択スイッチにより切り替え		
消費電力	75W(バッテリー駆動可 ※別売)		
その他	フィルムロールの交換ポスター/使い方ポスター/設置案内ステッカー 付		
梱包サイズ	幅520mm、奥行き580mm、高さ360mm		



## ラップポン専用消耗品

品名	専用凝固剤カタメルポリマー	価格	1,150円(税抜)
品番	C0C0P001J	材質	高吸水性樹脂(1箱425g、50袋入り)
品名	フィルムロール	価格	4,000円(税抜)
品番	C0F150C1J	材質	ポリエチレン(約50回分)
品名	ウェットティッシュ	価格	550円(税抜)
品番	C0WT0002J	材質	ノンアルコール、無香料(1袋・100枚入り)

※ラップポンの使用には必ず消耗品が必要となります。 ※未開封・保管状況により5年保証。

## 専用消耗品セット Bタイプ

品番	C0SEWS05J
価格	5,700円(税抜)
セット内容	専用凝固剤カタメルポリマー フィルムロール ウェットティッシュ
梱包サイズ	幅345mm、奥行き230mm、高さ130mm ※2セットまで同梱できます。



## オプション

### ラク・アーム WR-3

品番	WR3AR001JH	価格	38,000円(税抜)
質量	約8kg		
寸法	本体…幅570mm、奥行き570mm、高さ820mm		
	アーム高さ…615mm 背もたれ高さ…820mm		
材質	パイプ…鋼材 手すりクッション部…エラストマー		



### ダンビー WD-3

品番	WD3DH001JH	価格	30,000円(税抜)
寸法	組立時:幅980mm、奥行き930mm、高さ1805mm		
	収納時:幅1090mm、奥行き1100mm、高さ130mm		
質量	梱包時:約14kg 本体のみ:約11kg		
材質	壁板…段ボール 底板・天井板…プラスチック段ボール プラビス…プラスチック		



### 車用DCケーブル Bタイプ

品番	C0CCB10MS	寸法	10m
価格	11,000円(税抜)	規格	12V車用 電源スイッチ付き



### バッテリー-LIB5-DX

品番	BALPL5DXJH	価格	26,000円(税抜)	電池容量	5200mAh
USB出力	DC5V Max 2A	本体質量	約530g	出力電圧	DC14.8V
充電電池	リチウムイオンバッテリー	LED残量表示	5段階	適応規格	PSE、CE対応
寸法	幅74.79mm、高さ181.82mm、厚み30.06mm				
充電時間	約4時間 ※1充電あたり使用可能回数:70回(連続使用)				



※トレッカー-2にご使用の場合は、別売りの専用ケーブル(4,800円)が必要となります。

## お問い合わせ先

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


東京本社 TEL: 03(3832)2201 FAX: 03(3833)6217  
 大阪営業部 TEL: 06(6532)4131 FAX: 06(6536)7456  
 名古屋支店 TEL: 052(934)2611 FAX: 052(934)2615  
 福岡支店 TEL: 092(431)9221 FAX: 092(451)3433  
 仙台営業所 TEL: 022(722)0884 FAX: 022(722)0796

## 製造元

日本セイフティー株式会社 ラップポン事業部  
 0120-208-718 e-mail: kaigo@nihonsafety.com  
 URL: http://www.wrappon.com

## 販売店



## 多くの災害現場での経験と発売から10年以上のノウハウで 災害用トイレ最高の一台へ

2005年のラップポンシリーズ発売から多くの災害を経験し、被災地での声を活かして改良を重ね、益々使いやすい商品になりました。

近年、耳にすることが多くなった「災害関連死」。

災害関連死とは、災害による直接的な被害でなく、避難生活の疲労や環境の悪化等、間接的な原因で亡くなることを言います。

災害関連死を防ぐためにも、トイレは重要なキーワードです。水や食料よりも我慢できないのがトイレです。

水が流れなくなった不衛生なトイレでも、我慢できなくなれば使用してしまいます。不衛生なトイレを使用したくないために、食事や水分補給を控え、「エコノミー症候群」を発症し、死に至ることもあります。

トイレを我慢する必要のない環境を作ることは、関連死の防止にとって非常に重要になります。



### 自動ラップ機構って？

自動ラップ機構は水を使わず、熱圧着によって排泄物を1回毎に密封します。毎回、個包装にして切り離すので、清潔にご使用いただけます。また、排泄物は個包装になっているので、後処理の手間もなく、お手入れも簡単です。



#### 処理開始

排泄後、作動ボタンを押すと「処理を開始します」と音声案内が流れ自動ラップ処理が開始されます。

#### フィルム送り

排泄で飛び散った汚れ部分も全てフィルムが送られて閉じ込めます。

#### 熱圧着

排泄物を密封するため熱圧着します。

#### 切り離し

「処理が完了しました。トレーから袋を取り出してください」と音声案内が流れると切り離されて完了です。

### 使い方はとっても簡単



#### 専用凝固剤を入れる

専用凝固剤を投入し、排泄を済ませます。排泄物の水分を凝固させるために凝固剤を使用します。



#### スイッチのボタンを押す

排泄後、スイッチのボタンを押してください。自動でラップを開始します。防臭フィルムは自動で供給されます。



#### ラップ済み袋を取り出す

約90秒後、終了音(ピッピッピー)が鳴ると切り離し完了です。底トレーを引き出し、ラップ済み袋を取り出してください。

# ラップポンだからできる 安心の10機能



## 1 臭いや菌を漏らさない防臭フィルム

特殊な防臭フィルム(BOS)と熱圧着により臭いや菌を外に漏らしません。<sup>※1</sup>  
また、ラップする事で汚物や吐しゃ物による二次感染を予防します。<sup>※2</sup>  
防臭フィルムはポリエチレン素材のため焼却しても有害なガスは発生しません。

ラップされた袋は紙オムツと同様の処理が可能です。<sup>※3</sup>

※1 ラップ済み袋は、長期保存すると臭いが漏れる場合もございますので、早めの処分をお願いします。

※2 ラップポンは感染を完全に防ぐものではありません。

※3 自治体の判断によって処理方法が異なる場合もございますので、各自治体の指導に従い処理してください。



## 2 安心の音声案内



作動ボタンを押した時に「処理を開始します」や処理終了時に「処理が完了しました。トレーから袋を取り出してください」等の音声案内が流れるようになり、より便利にご使用いただけます。

## 3 緊急時対応可能なオプション品

ラップポンでは、停電などで電源が確保できない場合にも対応できる各種オプション品を取り揃えています。

小型で保存に最適なりチウムイオンバッテリーの「LIB5-DX」。車のシガーソケットに接続して使用する「専用DCケーブル」。どなたでも簡単・安全に接続して使用できる商品を提供しています。



NEW 本体注文時にオプションとしてエチケット音機能をつける事も可能です。

## NEW 4 処理時間の目安を表示

リモコンに処理終了までのカウントダウン表示が付き、圧着完了までの目安がわかりやすくなりました。  
また、「おす」ボタンが一段とわかりやすくなりました。



## NEW 5 更にコンパクトで持運びも簡単に

本体は傷が付いてもサビにくくお手入れしやすいアルミニウム合金製。  
軽量なので持ち運びも簡単で、災害時にはすぐに設置・使用が可能です。  
使わない時にはコンパクトに収納も可能です。



## NEW 6 省電力モード/電源OFF機能

使用后1分で省エネモードになり、60分以上使用しない場合電源が自動的にOFFになる待機モードを搭載しました。  
長時間使用していない際のバッテリー(別売)の消費をさらに軽減できるようになりました。

## NEW 7 収納ポケット搭載

両脇に収納ポケットが搭載され、バッテリーなどを収納することも可能になりました。



## 8 工具不要で組立て簡単

組み立てには工具を使わず、2箇所のネジを留めるだけ。  
作業中など手袋をはめたままでも簡単に組み立てができます。


## 9 安心設計の安全機能付き

フィルムが閉じる時に異物や人間の手等が挟み込まれるのを感知すると動作を中断する「挟み込み防止機能」を搭載しています。  
(ラップポンは初号機から全ての商品に「挟み込み防止機能」が搭載されています。)


## 10 特殊フィルムと凝固剤の信頼の試験データ

ラップ済み袋をそれぞれの条件で試験を行い、臭気漏れ・微生物(細菌)の遮断効果を確認しています。  
また、ラップポン専用凝固剤を併せて使用することで優れた除菌効果も確認できました。


### 微生物除菌効果(大腸菌群)

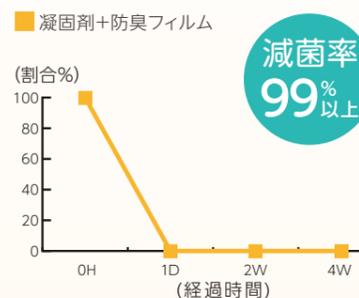

### 微生物遮断効果(大腸菌群)

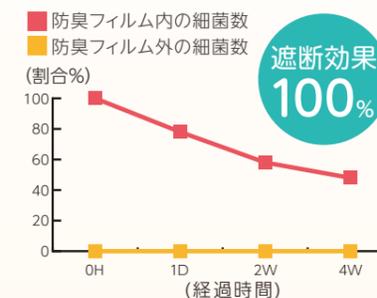

### 消臭 & 防臭効果(硫化水素)

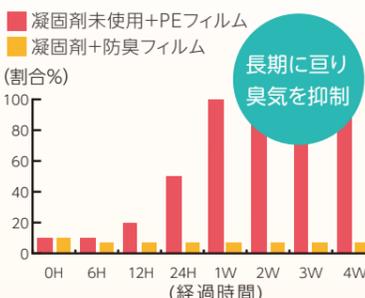

※当社試験データに基づきます。※試験は袋に損傷がない場合とします。

### 消耗品の目安

大人1人1日当りの排便数が約5回と言われています。200人の避難所では1週間で約7000回使われる事になります。



### 環境に合わせた、おすすめセット

バッテリーLIB5-DXやDCケーブル、ダンボール個室ダンビー2などラップポンと一緒に揃えておけば更に安心です。

#### 基本おすすめセット

221,700円



#### 福祉避難所には

福祉避難所セット価格  
259,700円



#### 災害支援車両には

災害支援車両セット価格  
176,700円



## GVだけのお得な特典

### 1 安心の5年保証

メーカー保証が1年保証から安心の5年保証になります。

### 2 ポスター、案内ステッカー付き

使い方ポスター、フィルムロールの交換ポスター、設置案内ステッカーが付いているため、被災時によりわかりやすく、安心してご使用いただけます。

